

LUNA NÁVOD PRO UŽIVATELE

Blahopřejeme Vám k vlastnictví LUNA, předmětu pro potěšení. Dříve než se blíže seznámíte se svojí LUNA, věnujte prosím chvíli informacím uvedeným v Návodu pro uživatele.

www.lelodesign.cz

Ženský klín je fascinující umělecké dílo. Správnou péčí o tento poklad dosáhnete znamenité síly a Vaše touha se naplní ohromující a neodolatelnou rozkoší. Věnujte svému tajemství veškerou pozornost, buďte však opatrní.

ÚVOD


Všechny svaly na našem těle slábnou a ztrácí svojí elasticitu, pokud je řádně neposílujeme. Stejně je to s poševními svaly a se svaly pánevního dna. K povolání těchto důležitých svalů vede těhotenství a následně porod, dále také hormonální změny zapříčiněné stárnutím. Výsledkem může být mimo jiné i omezení až ztráta sexuální vzrušivosti. Posilováním poševních svalů a svalů pánevního dna celkově zvýšíte své zdraví – získáte kontrolu nad svým tělem a podpoříte své sexuální sebevědomí. Samozřejmě zvýšíte i svůj erotický apetit a položíte tak základy pro dosažení intenzivních orgasmů.

Venušiny kuličky LUNA kombinují potěšení a posilování svalů pánevního dna současně. Pohybem s kuličkami LUNA zvýšíte odpor a vyvoláte nepatrné záchvěvy s jejichž pomocí dosáhnete příjemných ale hlavně velice užitečných a účinných „Kegelových cviků“.

www.lelodesign.cz

O KULIČKÁCH LUNA

Balení LUNA obsahuje silikonové tělo a dva páry vyměnitelných kuliček různých velikostí. Váhu každé kuličky poznáte podle její barvy. Dvě růžové kuličky váží 28 gramů (základní kulička k níž je připojen hygienický provázek a jedna „korunní“ kulička) a dvě 37 gramové kuličky v modré barvě (základní kulička k níž je připojen hygienický provázek a jedna „korunní“ kulička). Váhu kuliček LUNA můžete nakombinovat od 28 – 79 gramů.

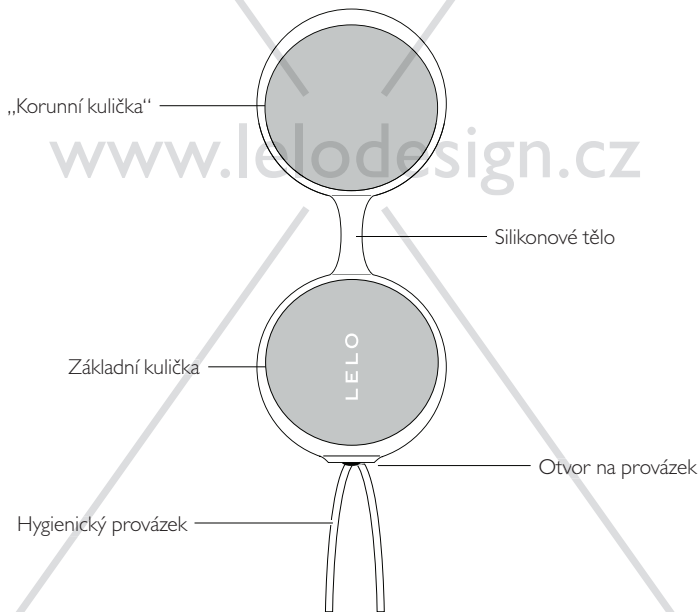

• 5

JAK SLOŽIT KULIČKY LUNA

Základní kuličky můžete používat samostatně nebo za pomoci silikonového těla.

1. **Provlékněte hygienický provázek kuličky kterou jste si vybrala skrz otvor na provázek na silikonovém těle.**
2. **Zatlačte na kuličku tak aby se správně umístila a aby ji silikonové tělo pevně sevřelo.**
3. **Vyberte si „korunní“ kuličku. A při umístění postupujte stejně jako u kuličky základní.**

Svaly pánevního dna nemusí být zprvu v dokonalé „kondici“, proto můžete začít cvičit pouze s jednou základní kuličkou a postupně váhu zvyšovat. Nejdůležitější je aby Vám kombinace kuliček vyhovovala a abyste se cítila pohodlně.

www.lelodesign.cz

• 6


APLIKACE KULIČEK LUNA

Aplikace kuliček LUNA není nijak složitá a neliší se od aplikace obyčejného hygienického tamponu. Protože mají kuličky LUNA širší obvod pročtěte si několik tipů pro jednodušší aplikaci.

1. **Pro usnadnění aplikace použijte lubrikační gel – vždy jen na horní část kuličky/kuliček, které chcete použít. Vyhněte se velkým dávkám lubrikantu, to by Vám rozhodně aplikaci neusnadnilo, spíš naopak – kuličky by byli až příliš kluzké a bylo by velmi obtížné umístit je na správné místo.**
1. **Při aplikaci ležte na zádech, pokud máte se zasunutím problém, zvedněte pánev – to Vám může pomoci. Některé ženy dávají přednost zavádět kuličky LUNA vestoje s jednou nohou zdviženou.**
1. **Pokud chcete použít dvě kuličky v silikonovém těle, nejdříve zaveďte „korunní“ kuličku. Poševní svaly ji možná budou chtít vypudit ještě dřív než zavedete kuličku druhou. Proto buďte v klidu a pomalu zhluboka dýchejte.**

UMÍSTĚNÍ

Kuličky by měli být umístěny dostatečně hluboko, zhruba tak, aby byla základní kulička 2 cm od poševního vchodu. Nejdůležitější je to, že se tato základní kulička opírá o svaly pánevního dna. Přesná vzdálenost od poševního vchodu k pánevnímu dnu se u každé ženy liší, proto kuličky LUNA umísťte zhruba tak jako hygienický tampon. Hygienický provázek nechte vždy vyčnívat, usnadní Vám to vyndávání kuliček LUNA.

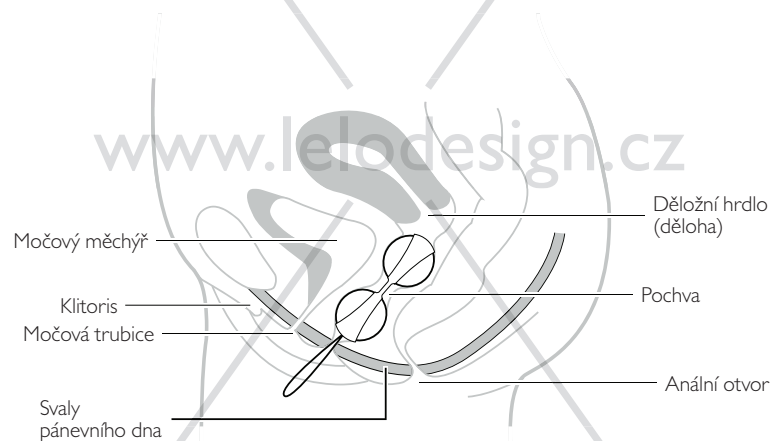

• 7

• 8

POUŽÍVÁNÍ KULIČEK LUNA

Pokud chcete používat kuličky LUNA hlavně kvůli procvičování svalů, je potřeba, abyste jejich používání zařadila do svého denního programu. Dosažení patrných změn závisí na momentální způsobilosti Vašich poševních svalů a svalů pánevního dna – výsledky by však měly přijít zhruba po 12 týdnech třicetiminutového cvičení denně.

Zpočátku Vám může být používání kuliček LUNA trochu nepříjemné a můžete se cítit nepohodlně – to proto že na ně Vaše tělo není zvyklé a až příliš si kuličky uvědomuje. Může se také stát, že mají kuličky tendenci vypadávat už po pár minutách. V tomto případě se nevzdávejte a vytrvejte ve svém cvičebním programu. Cvičením se svaly začnou zpevňovat a pak už pro ně nebude žádný problém kuličky udržet.

Při chůzi, běhání, plavání a dalších pohybových aktivitách se začnou vnitřní malé kuličky chvět a vytvářet tak jemné vibrace stimulující poševní svaly. I když budete stát v klidu, gravitace bude vyvolávat přirozené stahování svalů pánevního dna – to je důkaz toho, že se svaly snaží zadržet kuličky uvnitř.

• 9

SPECIFIKACE

| | |
|------------------|---------------------------------------|
| Materiál | PC-ABC / silikon |
| Povrchová úprava | hedvábná / hladká |
| Velikost těla | 89 x 35 x 16 mm |
| Velikost kuliček | 32 gramů |
| Váha kuliček | 2 x 28 g (růžové) 2 x 37 g (modré) |

Prohlášení

LELO ani jeho distributoři nezodpovídají a neručí za používání přístroje rozkoše.

Model nesmí být měněn za účelem zdokonalení bez předběžného upozornění.

© 2008 LELO AB. VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA.
NAVRHLA A VYVINULA LELO SWEDEN.
SESTROJILA LELO CLR.

• 11

ČIŠTĚNÍ, ULOŽENÍ A BEZPEČNOST

Životnost Vašich kuliček LUNA prodloužíte, pokud se o ně budete správně starat. LELO Vám doporučuje nepoužívat lubrikanty na bázi silikonu – to by mohlo porušit silikonové tělo - mohlo by se stát lepkavým. Nejvhodnější jsou lubrikanty na bázi vody. Pokud chcete použít lubrikant založený na silikonu, vyzkoušejte ho nejprve na malé části přístroje. Jako lubrikanty nikdy nepoužívejte krémy na ruce nebo masážní oleje.

Kuličky LUNA rozeberte a omyjte vždy před i po každém použití horkou vodou a antibakteriálním mýdlem, osušte ručníkem či utěrkou. K čištění nepoužívejte alkohol, benzín nebo aceton.

Nenechávejte Vaše kuličky LUNA na přímém slunci a nevystavujte je prachu a extrémnímu horku. Skladujte je mimo hračky a jiné materiály.

Nepoužívejte kuličky LUNA během těhotenství!

• 10

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

FunConcept s.r.o. poskytuje na LUNA záruku v trvání DVOU LET od data nákupu, na závady vzniklé špatným provedením nebo vadou materiálu. Pokud zjistíte závadu a uvědomíte o ní společnost FunConcept s.r.o. v záruční lhůtě, vymění FunConcept s.r.o. dle vlastního uvážení výrobek bezplatně.

Záruka platí jen při předložení příslušného dokladu (tj. vyplněného registračního formuláře nebo stvrzenky o nákupu), z něž vyplývá, že datum reklamace spadá do záruční lhůty.

Záruka není platná, pokud je závada způsobena neúmyslným poškozením, nesprávným použitím nebo zanedbáním péče.

Z hygienických důvodů nemůže FunConcept s.r.o. akceptovat vrácené zboží nebo provádět výměnu LUNA z jiných než výše uvedených důvodů, jakmile došlo k rozbalení.

VÝŠE UVEDENÁ PROHLÁŠENÍ NEMAJÍ VLIV NA VAŠE ZÁKONNÁ PRÁVA.

FunConcept s.r.o.
Distributor značek Fun Factory, LELO a Je Joue
pro Českou a Slovenskou republiku
Tel.: +420 777 162 877
E-mail: info@lelodesign.cz

www.funtoys.cz
www.lelodesign.cz
www.funconcept.cz
www.jejoue.cz

FunConcept s.r.o., Za Rybníkem 617, 252 42 Jesenice,
Česká republika, IČ : 26089955, DIČ: CZ26089955

FUN
FACTORY
www.funtoys.cz

JE JOUE

ZKUSTE TAKÉ
DALŠÍ ZNAČKY
DISTRIBUOVANÉ
FUNCONCEPT S.R.O.

• 12